

A photograph of a person's muscular back and arms, viewed from behind, set against a blue background. The person's hands are clasped together at the bottom. The lighting highlights the contours of the muscles.

ENCICLOPEDIA MEDICALA BTL
DRENAJUL LIMFATIC

V101AS25/01/2010



1. FRUMUSEȚE / ESTETICĂ / ÎNTREȚINERE CORPORALĂ 4

1.1 CELULITA 4

1.2 DETOXIFIAREA 5

1.3 SINDROMUL PICIOARELOR GRELE 6

1.4 ÎMBUNĂTĂȚIREA TROFICITĂȚII PIELII 7

1.5 LIPOEDEMUL 8

1.6 ÎNGRIJIRE POST-LIPOSUCȚIE 9

1.7 RECONVALESCENȚA 10

1.8 REGENERAREA 11

1.9 TENALGIA MEMBRELOR INFERIOARE 12

1.10 TENALGIA MEMBRELOR SUPERIOARE 13

1.11 PREVENIREA VARICELOR VENOASE 14

2. RECUPERARE MEDICALA 15

2.1 ACROCIANOZA MEMBRELOR INFERIOARE 15

2.2 ACROCIANOZA MEMBRELOR SUPERIOARE 16

2.3 SINDROMUL ALGODISTROFIC AL MEMBRELOR INFERIOARE 17

2.4 SINDROMUL ALGODISTROFIC AL MEMBRELOR SUPERIOARE 18

2.5 ARTROZA MEMBRELOR INFERIOARE 19

2.6 ARTROZA MEMBRELOR SUPERIOARE 20

2.7 SINDROMUL TUNELULUI CARPIAN LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE 21

program: Y-1000 Sindromul Tunelului Carpian la nivelul membrelor superioare 21

2.8 ANGIOPATIA DIABETICĂ 22

program: Y-1015 angiopatia diabetică 22

2.9 GUTA, POLIARTRITA 23

program: Y-1010 guta, poliartrita 23

2.10 EDEMUL CRONIC 24

program: Y-1007 edemul cronic 24

2.11 ISCHEMIA MEMBRELOR INFERIOARE 25

program: Y-1015 ischemia membrelor inferioare 25

2.12 NEUROPATIA, NEURALGIA 26

program: Y-1002 neuropatia, nevralgia 26

2.13 OBEZITATEA LA NIVELUL MEMBRELOR INFERIOARE 27

program: Y-1011 obezitatea la nivelul membrelor inferioare 27

2.14 OBEZITATEA LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE 28

program: Y-1012 obezitatea la nivelul membrelor superioare 28

2.15 ONCOLOGIE 29

program: Y-1015 oncologie 29

2.16 RECUPERAREA POST-TRAUMATICĂ LA NIVELUL MEMBRELOR INFERIOARE 30

program: Y-1016 recuperarea post-traumatică la nivelul membrelor inferioare 30

2.17 RECUPERAREA POST-TRAUMATICĂ LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE 31

program: Y-1017 recuperarea post-traumatică la nivelul membrelor superioare 31

**2.18 RECUPERAREA AFECȚIUNILOR CAUZATE DE APLICAREA UNUI DRENAJ MANUAL LIMFATIC
NECORESPUNZĂTOR 32**

program: Y-1018 recuperarea afecțiunilor cauzate de aplicarea unui drenaj manual limfatic necorespunzător 32

2.19 SINDROMUL RAYNAUD LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE 33

program: Y-1001 sindromul Raynaud la nivelul membrelor superioare 33

2.20 AFECȚIUNI TROFICE ALE PIELII LA NIVELUL MEMBRELOR INFERIOARE 34

program: Y-1013 afecțiuni trofice ale pielii la nivelul membrelor inferioare 34

2.21 AFECȚIUNI TROFICE ALE PIELII LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE 35

program: Y-1014 afecțiuni trofice ale pielii la nivelul membrelor superioare 35

2.22 INSUFICIENȚA VENOASĂ 36

program: Y-1015 insuficiența venoasă 36

1. FRUMUȘEȚE / ESTETICĂ / ÎNTREȚINERE CORPORALĂ

1.1 CELULITA

FRUMUȘEȚE / ESTETICĂ / ÎNTREȚINERE CORPORALĂ	
<i>Program</i>	Y-1019 program: Y-1019 celulita
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 5:00 Program 2: 0002 Durata: 15:00 Program 3: 0009 Durata: 40:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț, picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	60 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de minim 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	40 - 80 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, crește drenajul limfatic, sprijină întoarcerea venoasă, miorelaxant, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, hrănește pielea și zona subcutanată, trofic, crește metabolismul local (1544)



1.2 DETOXIFIEREA

FRUMUSEȚE / ESTETICĂ / ÎNTREȚINERE CORPORALĂ	
<i>Program</i>	Y-1023 program: Y-1023 detoxifierea
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 10:00 Program 2: 0004 Durata: 10:00 Program 3: 0013 Durata: 40:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț, picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	60 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de minim 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	4 - 6
<i>Presiunea</i>	30 - 70 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, crește drenajul limfatic, sprijină întoarcerea venoasă, miorelaxant, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, crește metabolismul local (1548)



1.3 SINDROMUL PICIOARELOR GRELE

FRUMUSEȚE / ESTETICĂ / ÎNTREȚINERE CORPORALĂ	
<i>Program</i>	Y-1022 program: Y-1022 sindromul picioarelor grele
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 5:00 Program 2: 0002 Durata: 10:00 Program 3: 0009 Durata: 30:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	45 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de minim o dată pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	40 - 70 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	crește drenajul limfatic, sprijină întoarcerea venoasă, crește metabolismul lactozei, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, miorelaxant (1547)



1.4 ÎMBUNĂȚĂȚIREA TROFICITĂȚII PIELII

FRUMUSEȚE / ESTETICĂ / ÎNTREȚINERE CORPORALĂ	
<i>Program</i>	Y-1024 program: Y-1024 îmbunătățirea troficității pielii
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 5:00 Program 2: 0009 Durata: 25:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț, picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de minim 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	30 - 45 mmHg; cu cât pielea este mai afectată, cu atât presiunea va fi mai mare
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic, hrănește pielea și zona subcutanată, trofic
<i>Notă</i>	Terapia poate fi folosită ca tratament eficient în dermatologie, în special în tratarea rănilor. (1549)



1.5 LIPOEDEMUL

FRUMUSEȚE / ESTETICĂ / ÎNTREȚINERE CORPORALĂ	
<i>Program</i>	Y-1021 program: Y-1021 lipoedemul
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 35 mmHg Program 1: 0003 Durata: 10:00 Program 2: 0007 Durata: 20:00 Program 3: 0015 Durata: 30:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț, picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	60 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de minim 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	20 - 80 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	crește drenajul limfatic, sprijină întoarcerea venoasă, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, hrănește pielea și zona subcutanată
<i>Notă</i>	Terapia aplicată cu regularitate dă fermitate pielii și îmbunătățește aspectul acesteia. (1546)



1.6 ÎNGRIJIRE POST-LIPOSUCȚIE

FRUMUSEȚE / ESTETICĂ / ÎNTREȚINERE CORPORALĂ	
<i>Program</i>	Y-1025 program: Y-1025 îngrijire post-liposucție
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 5:00 Program 2: 0002 Durata: 10:00 Program 3: 0007 Durata: 30:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț, picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	45 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de minim 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	40 - 70 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, crește drenajul limfatic, sprijină întoarcerea venoasă, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic, hrănește pielea și zona subcutanată, trofic
<i>Notă</i>	Terapia aplicată imediat după lipo-sucție poate duce la reducerea edemului în zona afectată și poate preveni aspectul neuniform al suprafeței. (1550)



1.7 RECONVALESCENȚA

FRUMUȘEȚE / ESTETICĂ / ÎNTREȚINERE CORPORALĂ	
<i>Program</i>	Y-1026 program: Y-1026 reconvalescența
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 35 mmHg Program 1: 0006 Durata: 10:00 Program 2: 0010 Durata: 10:00 Program 3: 0005 Durata: 25:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț, picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	45 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de minim 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare, până la refacere
<i>Presiunea</i>	30 - 70 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, miorelaxant, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic
<i>Notă</i>	Pe durata aplicării terapiei nivelul presiunii trebuie să fie cel mai confortabil pentru pacient, folosind pragul suportat de acesta. (1551)



1.8 REGENERAREA

FRUMUSEȚE / ESTETICĂ / ÎNTREȚINERE CORPORALĂ	
<i>Program</i>	Y-1029 program: Y-1029 regenerarea
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0002 Durata: 10:00 Program 2: 0004 Durata: 10:00 Program 3: 0009 Durata: 25:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț, picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	45 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de minim 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	40 - 90 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	crește drenajul limfatic, sprijină întoarcerea venoasă, crește metabolismul lactozei, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, miorelaxant
<i>Notă</i>	Pe durata aplicării terapiei nivelul presiunii trebuie să fie cel mai confortabil pentru pacient, folosind pragul suportat de acesta. (1554)



1.9 TENALGIA MEMBRELOR INFERIOARE

FRUMUSEȚE / ESTETICĂ / ÎNTREȚINERE CORPORALĂ	
<i>Program</i>	Y-1027 program: Y-1027 tenalgia membrelor inferioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 40 mmHg Program 1: 0014 Durata: 5:00 Program 2: 0002 Durata: 15:00 Program 3: 0005 Durata: 10:00
<i>Accesorii recomandate</i>	picioar, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de minim 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	minim 6 tratamente
<i>Presiunea</i>	30 - 70 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, miorelaxant, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic
<i>Notă</i>	Pe durata aplicării terapiei nivelul presiunii trebuie să fie cel mai confortabil pentru pacient, folosind pragul suportat de acesta. (1552)



1.10 TENALGIA MEMBRELOR SUPERIOARE

FRUMUȘEȚE / ESTETICĂ / ÎNTREȚINERE CORPORALĂ	
<i>Program</i>	Y-1028 program: Y-1028 tenalgia membrelor superioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 40 mmHg Program 1: 0014 Durata: 5:00 Program 2: 0002 Durata: 15:00 Program 3: 0005 Durata: 10:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de minim 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	minim 6 tratamente
<i>Presiunea</i>	30 - 70 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, miorelaxant, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic
<i>Notă</i>	Pe durata aplicării terapiei nivelul presiunii trebuie să fie cel mai confortabil pentru pacient, folosind pragul suportat de acesta. (1553)



1.11 PREVENIREA VARICELOR VENOASE

FRUMUȘEȚE / ESTETICĂ / ÎNTREȚINERE CORPORALĂ	
<i>Program</i>	Y-1020 program: Y-1020 prevenirea varicelor venoase
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0002 Durata: 10:00 Program 2: 0015 Durata: 20:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	30 - 50 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	sprijină microcirculația, slăbește durerea cauzată de ischemia locală, sprijină neurovascularizarea, sprijină întoarcerea venoasă
<i>Notă</i>	A nu se aplica pe zona venelor ce se cunosc sau se bănuiesc a fi afectate de o inflamație acută!! (1545)



2. RECUPERARE MEDICALA

2.1 ACROCIANOZA MEMBRELOR INFERIOARE

AFEȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1003 program: Y-1003 acrocianoza membrelor inferioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 35 mmHg Program 1: 0004 Durata: 5:00 Program 2: 0005 Durata: 10:00 Program 3: 0015 Durata: 15:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 1 - 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	20 - 35 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, sprijină microcirculația, neurovascularizarea, sprijină întoarcerea venoasă, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic
<i>Notă</i>	O presiune prea mare poate crește riscul de ruptură capilară! (1527)



2.2 ACROCIANOZA MEMBRELOR SUPERIOARE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1004 program: Y-1004 acrocianoza membrelor superioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 35 mmHg Program 1: 0004 Durata: 5:00 Program 2: 0005 Durata: 10:00 Program 3: 0015 Durata: 15:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 1 - 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	20 - 35 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, sprijină microcirculația, neurovascularizarea, sprijină întoarcerea venoasă, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic
<i>Notă</i>	O presiune prea mare poate crește riscul de ruptură capilară! (1528)



2.3 SINDROMUL ALGODISTROFIC AL MEMBRELOR INFERIOARE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1005 program: Y-1005 sindromul algodistrofic al membrelor inferioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 5:00 Program 2: 0002 Durata: 10:00 Program 3: 0015 Durata: 15:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Picior, pantalon
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 1 - 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	30 - 60 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, miorelaxant, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic (1529)



2.4 SINDROMUL ALGODISTROFIC AL MEMBRELOR SUPERIOARE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1006 program: Y-1006 sindromul algodistrofic al membrelor superioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 5:00 Program 2: 0002 Durata: 10:00 Program 3: 0017 Durata: 15:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 1 - 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	30 - 60 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, miorelaxant, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic (1530)



2.5 ARTROZA MEMBRELOR INFERIOARE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1008 program: Y-1008 artroza membrelor inferioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 5:00 Program 2: 0002 Durata: 15:00 Program 3: 0011 Durata: 10:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Picior, pantalon
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 1 - 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	30 - 100 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, miorelaxant, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic
<i>Notă</i>	Țineți cont de reacțiile pacientului și ajustați presiunea și variația acesteia în funcție de nivelul pragului suportat de pacient! (1532)



2.6 ARTROZA MEMBRELOR SUPERIOARE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1009 program: Y-1009 artroza membrelor superioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 5:00 Program 2: 0002 Durata: 15:00 Program 3: 0017 Durata: 10:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 1 - 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	30 - 100 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, miorelaxant, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic
<i>Notă</i>	Țineți cont de reacțiile pacientului și ajustați presiunea și variația acesteia în funcție de nivelul pragului suportat de pacient! (1533)



2.7 SINDROMUL TUNELULUI CARPIAN LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1000 program: Y-1000 Sindromul Tunelului Carpian la nivelul membrelor superioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 50 mmHg Program 1: 0017 Durata: 5:00 Program 2: 0002 Durata: 25:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 1 - 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	30 - 60 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, miorelaxant, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic (1522)



2.8 ANGIOPATIA DIABETICĂ

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1015 program: Y-1015 angiopatia diabetică
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic Nr. de completări ale tabelului: 15
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț, picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 1 - 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	20 - 35 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, sprijină microcirculația, neurovascularizarea, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic
<i>Notă</i>	O presiune prea mare poate crește riscul de ruptură capilară! (1526)



2.9 GUTA, POLIARTRITA

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1010 program: Y-1010 guta, poliartrita
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 3:00 Program 2: 0002 Durata: 20:00 Program 3: 0014 Durata: 7:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț, picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 1 - 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	30 - 100 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, miorelaxant, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic
<i>Notă</i>	Țineți cont de reacțiile pacientului și ajustați presiunea și variația acesteia în funcție de nivelul pragului suportat de pacient! (1534)



2.10 EDEMUL CRONIC

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1007 program: Y-1007 edemul cronic
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 10:00 Program 2: 0007 Durata: 20:00 Program 3: 0013 Durata: 30:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț, picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	minim 60 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de minim 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	30 - 70 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	antiedematos, reglează circuitul limfatic, sprijină drenajul limfatic, hrănește pielea și zona subcutanată, trofic, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, analgezic
<i>Notă</i>	Presiunea să nu depășească o valoare mai mare de 70 mmHg! O presiune mai ridicată poate provoca ruptura venelor limfatice și congestia de fluide în interstițiu. Întotdeauna țineți cont de reacțiile și de nevoile pacientului! Se recomandă deblocarea manuală a nodulilor limfatici. (1531)



2.11 ISCHEMIA MEMBRELOR INFERIOARE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1015 program: Y-1015 ischemia membrelor inferioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic Nr. de completări ale tabelului: 15
<i>Accesorii recomandate</i>	Picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	60 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 1- 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	20 - 45 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, sprijină microcirculația, neurovascularizarea, sprijină întoarcerea venoasă, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic
<i>Notă</i>	O presiune prea mare poate crește riscul de ruptură capilară! (1525)



2.12 NEUROPATIA, NEVRALGIA

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1002 program: Y-1002 neuropatia, nevralgia
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 35 mmHg Program 1: 0004 Durata: 15:00 Program 2: 0002 Durata: 15:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț, picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 1- 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	30 - 50 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, miorelaxant, sprijină regenerarea neuronală, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, hrănește pielea și zona subcutanată, trofic, crește metabolismul local
<i>Notă</i>	În cazurile de neuropatie acută, nu depășiți presiunea recomandată, țineți cont de reacțiile pacientului! (1524)



2.13 OBEZITATEA LA NIVELUL MEMBRELOR INFERIOARE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1011 program: Y-1011 obezitatea la nivelul membrelor inferioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 5:00 Program 2: 0003 Durata: 10:00 Program 3: 0009 Durata: 15:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	minim 30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de minim 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	40 - 100 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	crește drenajul limfatic, sprijină întoarcerea venoasă, crește metabolismul grăsimii, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, miorelaxant, hrănește pielea și zona subcutanată
<i>Notă</i>	Țineți cont de reacțiile pacientului și ajustați presiunea și variația acesteia în funcție de nivelul pragului suportat de pacient! (1535)



2.14 OBEZITATEA LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1012 program: Y-1012 obezitatea la nivelul membrelor superioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 5:00 Program 2: 0003 Durata: 10:00 Program 3: 0009 Durata: 15:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț
<i>Durata aplicației</i>	minim 30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de minim 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	40 - 100 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	crește drenajul limfatic, sprijină întoarcerea venoasă, crește metabolismul grăsimii, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, miorelaxant, hrănește pielea și zona subcutanată
<i>Notă</i>	Țineți cont de reacțiile pacientului și ajustați presiunea și variația acesteia în funcție de nivelul pragului suportat de pacient! (1536)



2.15 ONCOLOGIE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1015 program: Y-1015 oncologie
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 5:00 Program 2: 0007 Durata: 25:00 Program 3: 0013 Durata: 15:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț, picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	minim 45 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 2 - 3 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	30 - 70 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, reglează circuitul limfatic, sprijină drenajul limfatic, hrănește pielea și zona subcutanată, trofic, cenotic
<i>Notă</i>	Presiunea să nu depășească o valoare mai mare de 70 mmHg! O presiune mai ridicată poate provoca ruptura venelor limfatice și congestia de fluide în interstițiu. Întotdeauna țineți cont de reacțiile și de nevoile pacientului! Se recomandă deblocarea manuală a nodulilor limfatici. (1539)



2.16 RECUPERAREA POST-TRAUMATICĂ LA NIVELUL MEMBRELOR INFERIOARE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1016 program: Y-1016 recuperarea post-traumatică la nivelul membrelor inferioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 60 mmHg Program 1: 0010 Durata: 5:00 Program 2: 0005 Durata: 15:00 Program 3: 0001 Durata: 10:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	minim o dată pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare, până la refacere
<i>Presiunea</i>	30 - 90 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, miorelaxant, crește drenajul limfatic, sprijină întoarcerea venoasă, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic, hrănește pielea și zona subcutanată, trofic, hrănește pielea și zona subcutanată, trofic
<i>Notă</i>	Pe durata aplicării terapiei țineți cont de reacțiile pacientului. (1540)



2.17 RECUPERAREA POST-TRAUMATICĂ LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1017 program: Y-1017 recuperarea post-traumatică la nivelul membrelor superioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 50 mmHg Program 1: 0016 Durata: 5:00 Program 2: 0005 Durata: 15:00 Program 3: 0001 Durata: 10:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	minim o dată pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare, până la refacere
<i>Presiunea</i>	30 - 90 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, miorelaxant, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic, hrănește pielea și zona subcutanată, trofic, hrănește pielea și zona subcutanată, trofic
<i>Notă</i>	Pe durata aplicării terapiei țineți cont de reacțiile pacientului. (1541)



2.18 RECUPERAREA AFECȚIUNILOR CAUZATE DE APLICAREA UNUI DRENAJ MANUAL LIMFATIC NECORESPUNZĂTOR

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1018 program: Y-1018 recuperarea afecțiunilor cauzate de aplicarea unui drenaj manual limfatic necorespunzător
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 30 mmHg Program 1: 0001 Durata: 15:00 Program 2: 0007 Durata: 45:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț, picior, pantalon
<i>Durata aplicației</i>	minim 60 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 2 - 3 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	maxim 70 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	antiedematos, reglează circuitul limfatic, sprijină drenajul limfatic, hrănește pielea și zona subcutanată, trofic, îmbunătățește reacția vegetativă cauzată de aplicarea unui drenaj manual limfatic necorespunzător, deblochează principalii noduli limfatici
<i>Notă</i>	Presiunea să nu depășească o valoare mai mare de 70 mmHg! O presiune mai ridicată poate provoca ruptura venelor limfatice și congestia de fluide în interstițiu. (1542)



2.19 SINDROMUL RAYNAUD LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1001 program: Y-1001 sindromul Raynaud la nivelul membrelor superioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 20 mmHg Program 1: 0015 Durata: 20:00 Program 2: 0015 Durata: 10:00 Program 3: 0005 Durata: 10:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	de 1 - 2 ori pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	20 - 35 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, sprijină microcirculația, neurovascularizarea, sprijină întoarcerea venoasă, ajută la regenerarea țesuturilor, cenotic
<i>Notă</i>	O presiune prea mare poate crește riscul de ruptură capilară! (1523)



2.20 AFECȚIUNI TROFICE ALE PIELII LA NIVELUL MEMBRELOR INFERIOARE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1013 program: Y-1013 afecțiuni trofice ale pielii la nivelul membrelor inferioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 35 mmHg Program 1: 0006 Durata: 5:00 Program 2: 0011 Durata: 5:00 Program 3: 0015 Durata: 20:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Picior, pantaloni
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	minim o dată pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	30 - 45 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, hrănește pielea și zona subcutanată, sprijină neurovascularizarea, trofic
<i>Notă</i>	O presiune prea mare poate provoca leziuni la nivelul pielii! (1537)



2.21 AFECȚIUNI TROFICE ALE PIELII LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1014 program: Y-1014 afecțiuni trofice ale pielii la nivelul membrelor superioare
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic secvențial Pauza: nu Presiunea recomandată: 35 mmHg Program 1: 0006 Durata: 5:00 Program 2: 0017 Durata: 5:00 Program 3: 0015 Durata: 20:00
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	minim o dată pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	30 - 45 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, hrănește pielea și zona subcutanată, sprijină neurovascularizarea, trofic
<i>Notă</i>	O presiune prea mare poate provoca leziuni la nivelul pielii! (1538)



2.22 INSUFICIENȚA VENOASĂ

AFECȚIUNI MEDICALE	
<i>Program</i>	Y-1015 program: Y-1015 insuficiența venoasă
<i>Parametri medicali</i>	Protocol: drenaj limfatic Nr. de completări ale tabelului: 15
<i>Accesorii recomandate</i>	Braț
<i>Durata aplicației</i>	30 minute
<i>Frecvența tratamentelor</i>	minim o dată pe săptămână
<i>Numărul de tratamente</i>	câte sunt necesare
<i>Presiunea</i>	30 - 45 mmHg
<i>Efectul tratamentului</i>	analgezic, antiedematos, sprijină microcirculația, ajută la regenerarea țesuturilor, hrănește pielea și zona subcutanată, sprijină neurovascularizarea, trofic
<i>Notă</i>	A nu se aplica pe zona venelor ce se cunosc sau se bănuiesc a fi afectate de o inflamație acută!! (1521)

